

# Ouderdomssimulatiepak GERT

---

**GERT creëert de ervaring ouderdom**



**[age-simulation-suit.com](http://age-simulation-suit.com)**

# Algemene veiligheidsadviezen

---

De simulatie van beperkingen op grond van leeftijd, ziekte of handicap brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee, zoals een verhoogd risico op ongevallen.

De simulatie van beperkingen moet daarom altijd met bijzondere voorzichtigheid plaatsvinden.

Onze producten mogen niet worden gebruikt bij mensen

- met reeds bestaande beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd, ziekte of handicap
- met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen, epileptici, met een neurologische of psychische ziekte, met hartklachten of een verhoogd risico op een beroerte
- met acute ziekten zoals infecties en huidaandoeningen

Veel aandacht en voorzichtigheid zijn geboden bij kinderen en jongeren, maar ook bij mensen met cognitieve beperkingen of gedragsstoornissen.

Het gebruik van onze producten kan alleen in een veilige omgeving en alleen onder toezicht van een vakkundige persoon plaatsvinden.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het gebruik. Dit moet ervoor zorgen dat de bovenstaande punten in acht worden genomen.

Naast deze algemene veiligheidsadviezen moeten de veiligheidsadviezen in de respectievelijke instructies in acht worden genomen.

---

---


# Instructie ouderdomssimulatiepak GERT

---

Bij het aantrekken van de onderdelen van het pak kunt u als proefpersoon het best gaan zitten. Laat u bij voorkeur helpen door een 2<sup>e</sup> persoon. Afhankelijk van datgene dat u wilt simuleren bepaald u of u alle onderdelen van GERT of een deel daarvan om of aan doet.

**Doe de overschoenen als eerste aan.**

## 1. Gewichtsgordels voor de enkels (2,5 kg.)

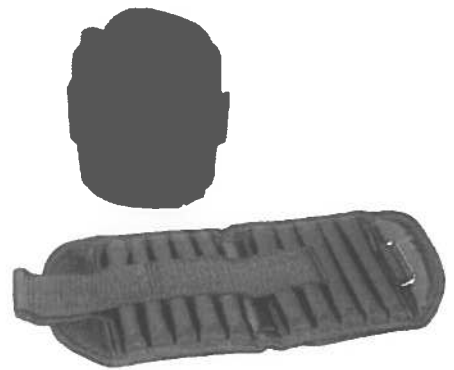

De gewichten kunnen worden aangepast door de ijzeren staven te verwijderen of toe te voegen.

## 2. Kniebandage



Bij een gestrekt been strak om de knie wikkelen.

## 3. Gewichtsvest (9,5 kg.)



De gewichtzakjes kunnen voor het aantrekken individueel worden aangepast en verdeeld. Het vest kan lichter en zwaarder gemaakt worden.

# Instructie ouderdomssimulatiepak GERT

---

## 4. Handschoenen



Er zijn 3 maten; S, M en L. De maat zo kiezen zodat de handschoen strak zit en de mogelijkheid tot grijpen beperkt wordt. Wegwerphandschoenen of dunne stoffen handschoenen die eventueel onder de handschoen kunnen worden aangetrokken, verminderen ook de gevoeligheid van de vingertoppen.

## 5. Gewichtgordels voor de polsen (1,5 kg.)



Over de manchetten van de handschoen aantrekken. Gewicht van de polsgordel kan niet worden aangepast.

## 6. Elleboogbandage



Bij een gestrekte arm strak om de ellebogen wikkelen.

# Instructie ouderdomssimulatiepak GERT

---

## 7. Halskraag



Sluiting naar de achterkant. Niet te strak aanleggen, zodat er nog een beperkte hoofdbeweging mogelijk is.

## 8. Speciale bril



De speciale bril van het simulatiepak kan over de eventuele bril van de proefpersoon gedragen worden.

## 9. Oorbeschermers of oordopjes



De oordopjes kunnen door de proefpersoon zelf ook voor het aantrekken van de handschoenen ingedaan worden.

# Instructie ouderdomssimulatiepak GERT

---

## Let op

Door het aantrekken van het ouderdomssimulatiepak, kunnen minder sterke personen, of personen met gezondheidsproblemen overmatig belast worden. Elke proefpersoon dient naar zijn gezondheidstoestand gevraagd te worden. Het ouderdomssimulatiepak mag alleen onder vakkundig toezicht gebruikt worden.

De gewichten moeten worden verminderd voor lichamelijk zwakke personen. De ouderdomssimulatiepak is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en oudere personen.

## Reiniging

Alle onderdelen kunnen in de handwas, met lauwwarm water en een fijnwas-middel gewassen worden.

Voor het wassen dienen de glazen uit de bril verwijderd te worden! Het glas mag niet in water worden gedoopt of worden afgespoeld, omdat er anders door het vacuüm water tussen de dubbele glazen kan komen, wat nooit meer helemaal verwijderd kan worden.

## Uitnemen en terugplaatsen van de brillenglazen

Zo mogelijk het glas niet met onbeschermd vingers aanraken. (Gebruik b.v. wegwerphandschoentjes)

De elastische rand eromheen zachtjes naar buiten drukken.

Bij het terugzetten van het glas beginnen bij de neusuitsparing en de rand over het glas drukken. Daarna naar de zijanten werken. Als laatste de bovenkant over het glas schuiven. Daarna de rand goed aandrukken.

---

### Contact in Duitsland

Produkt + Projekt Wolfgang Moll  
Andreasweg 7  
89168 Niederstotzingen  
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50  
Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

[info@produktundprojekt.de](mailto:info@produktundprojekt.de)  
[www.produktundprojekt.de](http://www.produktundprojekt.de)

### in Nederland

It Fits  
Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg  
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)13 - 53 63 80 7  
Fax: +31 (0)13 - 53 50 99 8

[info@it-fits.nl](mailto:info@it-fits.nl)  
[www.it-fits.nl](http://www.it-fits.nl)

---

# Instructie simulatiebrillen

---



Makula degeneratie



Cataract



Glaucoom



Eenzijdige netvliesloslating



Diabetische retinopathie



Retinitis pigmentosa

**Indien u bril dragend bent kiest u er zelf voor om deze op te houden of af te zetten. De simulatiebrillen alleen in een veilige en bekende omgeving gebruiken onder toezicht van een 2<sup>e</sup> persoon. Geen deelname aan het verkeer en geen machines bedienen!**

Uit veiligheidsoverwegingen geven de brillen, ook in het zwarte gedeelte, toch een beperkt zicht. Toch bestaat een verhoogd ongeval / valrisico. Voor de veiligheid van de gebruiker zijn de brillen met veiligheidsglas uitgerust.

De poten van de bril kunnen in lengte worden ingesteld. De bril dient stevig en vlakbij het gezicht van de gebruiker te zitten. De gebruiker dient in plaats van de pupillen, het hoofd te bewegen.

De bril alleen droog reinigen, bijvoorbeeld met een brillendoekje. Nooit met water of reinigingsmiddelen in contact brengen, omdat daardoor de folie beschadigd kan raken.

---

## Contact in Duitsland

Produkt + Projekt Wolfgang Moll  
Andreasweg 7  
89168 Niederstotzingen  
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50  
Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

[info@produktundprojekt.de](mailto:info@produktundprojekt.de)  
[www.produktundprojekt.de](http://www.produktundprojekt.de)

## in Nederland

It Fits  
Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg  
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)13 - 53 63 80 7  
Fax: +31 (0)13 - 53 50 99 8

[info@it-fits.nl](mailto:info@it-fits.nl)  
[www.it-fits.nl](http://www.it-fits.nl)

---

# Instructie tremor simulator

---

Let u ook op de bijgevoegde instructies. Niet gebruiken bij personen met een pacemaker, hartproblemen, met epilepsie.



## 1. Handschoen aantrekken



Twee paar handschoenen in twee maten worden geleverd. Kies de juiste maat. Indien nodig moet u de kabels met de drukknoppen overbrengen naar het paar in de andere maat. Trek de handschoen zo aan dat de handschoen met de zwarte boord bij rechtshandige personen rechts, en bij linkshandige personen links zit. Mocht het effect niet voldoende merkbaar zijn, dan kunt u vooraf de handen een beetje vochtig maken om het geleidingsvermogen te verbeteren.

## 2. Bediening inschakelen en de intensiteit langzaam verhogen

Het effect zal iets vertraagd merkbaar zijn. Zodra de handen trillen, de intensiteit niet meer verhogen. De handen moeten ontspannen zijn. De gebruiker kan het effect direct onderbreken door de handen tegen elkaar te houden.





# Instructie tremor simulator

---

## **Veiligheidstips voor gebruik**

Gebruik van scherpe, spitse of breekbare voorwerpen kunnen door het trillen tot een verhoogd ongevalsrisico leiden. Daarnaast kunnen metalen voorwerpen de stroom geleiden. Gebruik daarom alleen ongevaarlijke en niet metalen voorwerpen voor oefeningen met de tremor simulator.

Aanbevolen wordt bijvoorbeeld:

Bekers, borden en bestek van kunststof voor eet oefeningen  
Stiften van kunststof of hout voor schrijfoefeningen

Let u er op dat voorwerpen makkelijk uit de hand kunnen glijden. Het is beter als de proefpersoon het apparaat niet zelf bedient, maar dat dit door een vak-kundig persoon gedaan wordt. Die zal de proefpersoon moeten observeren en het apparaat voorzichtig moeten bedienen. Het is belangrijk om de stimulatie-stroom voorzichtig op te hogen naar het gewenste niveau.

**Geen bediening van apparaten, in het bijzonder elektronische apparaten terwijl u deze handschoenen draagt!**

**Geen bediening van voertuigen of machines terwijl u deze handschoenen draagt!**

## **Was instructies voor de handschoen**

De handschoen mag in de handwas met een zacht wasmiddel gewassen worden.

**De elektroden voor het wassen verwijderen!**

De handschoenen zijn ook apart na te bestellen.

---

### **Contact in Duitsland**

Produkt + Projekt Wolfgang Moll  
Andreasweg 7  
89168 Niederstotzingen  
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50  
Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

[info@produktundprojekt.de](mailto:info@produktundprojekt.de)  
[www.produktundprojekt.de](http://www.produktundprojekt.de)

### **in Nederland**

It Fits  
Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg  
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)13 - 53 63 80 7  
Fax: +31 (0)13 - 53 50 99 8

[info@it-fits.nl](mailto:info@it-fits.nl)  
[www.it-fits.nl](http://www.it-fits.nl)

---