

Quick Start Guide

RealCare Baby

Stap 1: Laptop opstarten

- Start de laptop op
- Aanmelden
 - o Druk de toetsencombinatie 'ctrl + alt + del in'
 - o Gebruikersnaam: Administrator
 - o Wachtwoord: (geen wachtwoord)
 - o Druk op 'aanmelden'

Stap 2: XStick USB

Plug de XStick USB in een USB-poort van de laptop



Stap 3: RealCare Control Centre

- Open de 'RealCare Control Centre' software (bureaublad)
 -  **RealCare® Control Center**
- Controleer als de baby geconnecteerd is
 - o Connectie * → ga verder naar stap 5
 - o Geen connectie  → ga verder naar stap 4

Stap 4: RealCare Control Centre

- Oplossing 1
 - o Sluit de software af
 - o Unplug de XStick USB
 - o Plug de XStick USB in de laptop
 - o Heropen de software
- Oplossing 2
 - o De knop (zie stap 7b) aan de achterkant van de Baby indrukken (paperclip) gedurende 2 geluidssignalen

Stap 5a: Programmeren


- Selecteer de Baby
 - 
X Baby ID
✓ BABY1213
Program Baby
- Druk op 'Program Baby'
- Class
 - o --New Class --
 - o Schoolnaam + klas
- Vul de naam van de leerling in
- Vul de naam van de Baby in

Stap 5b: Programmeren

- Selecteer de start- en eind datum/uur
- Selecteer het gewenste programma
 - o Zie bijlage 'Infant Care Schedule Table'
- Quiet Times (optioneel)
 - o Stille momenten programmeren
- Klok op 'Done' (rechtsboven)

Stap 6: Programma verzenden naar de baby

- Druk op de knop 'Send to Baby(s)

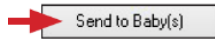


- Je hoort een geluidssignaal ter bevestiging

Stap 7a: Programma stoppen

- Connecteer de baby met de laptop
- Menu link → Klik op 'Active'
 - o Selecteer de baby
 - o Druk op de knop 'Stop'
 - o Je hoort een geluidssignaal ter bevestiging

Stap 7b: Noodstop (optioneel)

- De knop aan de achterkant van de baby indrukken (paperclip) gedurende 6 geluidssignalen

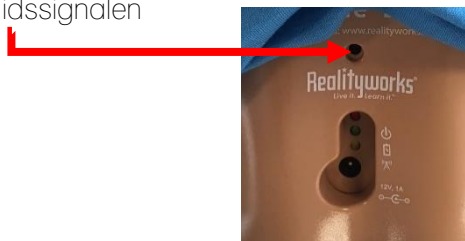

Stap 8: Rapport ophalen

- Menu links → 'Reports'
 - o Selecteer de juiste class
 - School + klas
 - o Selecteer het rapport van de betreffende leerling
 - 'Print' → rapport uitprinten
 - 'View' → rapport bekijken

Stap 9: Afsluiten

- Sluit de software 'RealCare Control Centre'
- Unplug de XStick USB
 - o Veilig verwijderen is niet noodzakelijk
- Sluit de laptop af

Stap 10: Vragen?

- Contacteer Rinaldo Menichetti
 - o 089 39 59 81
 - o 0498 13 03 39
 - o rinaldo.menichetti@rtclimburg.be

Opgelet

Als de baby gekoppeld via de adapter aan het net gekoppeld is kan er geen demo uitgevoerd worden.