



Reanimatiepop Baby

Quickstart Guide



Inhoud

Voor je begint.....	2
Inleiding	2
Uitpakken en controleren	2
Onderdelen.....	2
Plaatsen van het longzakje.....	3
De pop gebruiken.....	4
Monitor AAN  	4
Reanimatie signalen.....	4
Na afloop van een oefensessie.....	4

Voor je begint...

Inleiding

Met deze oefenpop kan je op een unieke wijze reanimaties via een trainingscomputer volgen. Dit gebeurt via visuele en auditiieve feedback over de correcte uitvoering van de hartcompressies. Ook de diepte (minstens 5 cm) waarmee de compressies worden uitgevoerd, voelt levensecht aan en komt overeen met de kracht waarmee deze in echte situaties worden uitgevoerd.

Uitpakken en controleren


- Lichaam baby
- Tas
- Longzakje

Opgelet




- Reinig de pop vooraleer je aan de slag gaat.
- Gebruik hiervoor het reinigingsdoekje of een mengsel van water en zeep.
- Gebruik geen schuurmiddelen!

Onderdelen

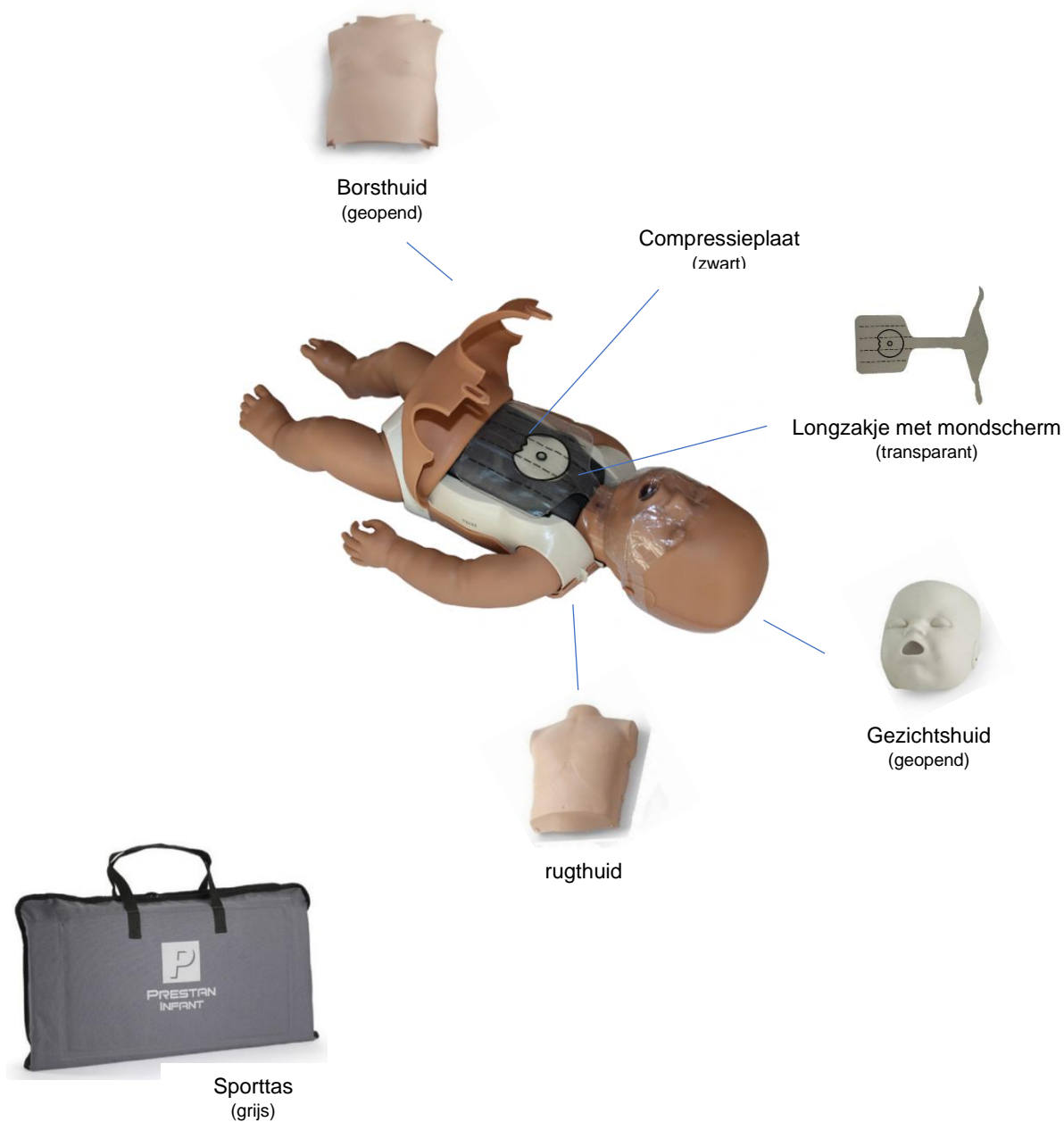

Plaatsen van het longzakje


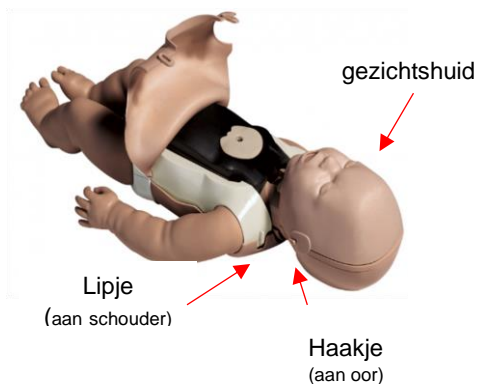


Wegnemen gezichtshuid

- Maak de gezichtshuid los van de babypop via de haakjes aan de oren.



Openen borsthuid

- Open de borsthuid van de babypop door ze ter hoogte van de schouders los te schuiven van de 'lipjes'.

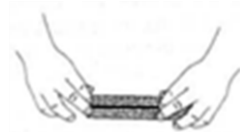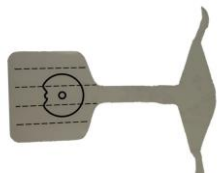


Longzakje plooien

- Neem het longzakje en plooi het op volgens de gestippelde lijnen die erop geprint staan.

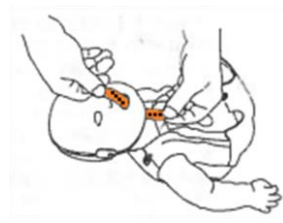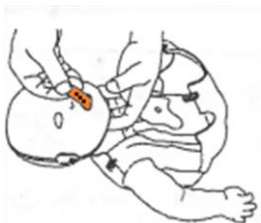

Het longzakje insteken

- Kantel het hoofd van de pop naar achteren.
- Steek het longzakje met de geplooid zijde door de mond van de pop tot het aan de nek uitsteekt.

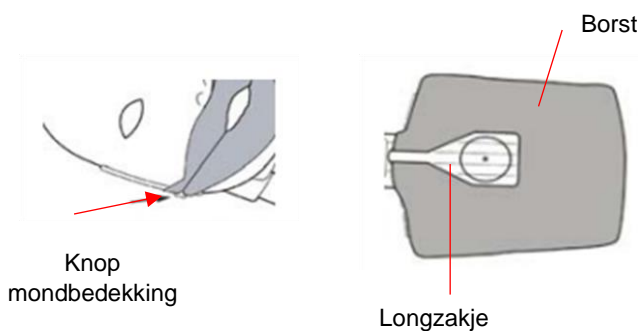


Longzakje met mondscherm

- Open het mondscherm en bevestig het aan de 2 'knoppen' die zich aan de oren bevinden.
- Open het **longzakje** en leg het **passend** op de zwarte compressieplaat.

Opgelet 

Zorg dat het longzakje niet verdraaid is!

De pop gebruiken...

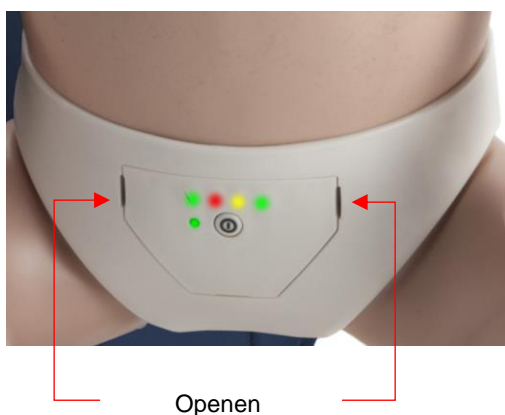

Monitor AAN

- De lichten van de monitor aan de bovenkant van de luier kan je inschakelen door op de aan/uit -knop te drukken.


LED 's

- Naast de vier monitor-lampjes zal ook het groene 'AAN' - led gaan branden. Deze geeft aan dat de batterijen werken en de lichtjes in orde zijn.

Opgelet 

Controleer de batterijen wanneer de lichtjes niet branden (twee AA-batterijen (1,5V)

Open hiervoor het deksel van de monitor en trek de staafhouder met de LED 's eruit.

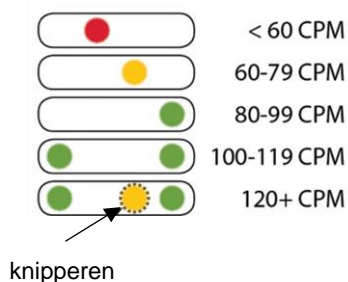


Reanimatie signalen

 rood signaal: het aantal compressies bedraagt nul tot minder dan 60 cpm/min.

 oranje signaal: de 60 cpm/min worden bereikt.

 1^{ste} groen signaal: bij 80 cpm/min schakelt het oranje licht uit en gaat het eerste groene licht aan tot 100 cpm/min is bereikt.

 2 groene lichten: het juist aantal cpm/min tussen 100-120 zijn bereikt.

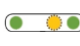 oranje licht knippert: (te) hoog aantal compressies/min.

Na afloop van een oefensessie

Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.