



Reanimatiepop Borst kind

Quickstart Guide



Inhoud

Inhoud	1
Voor je begint.....	2
Inleiding	2
Uitpakken en controleren	2
Opgelet 	2
Onderdelen.....	2
Verwijderen van het longzakje.....	3
Plaatsen van het longzakje	3
De borst gebruiken.....	4
Gebruik van het klikapparaat	4
Uitschakeling van het klikapparaat	4
Na afloop van een oefensessie.....	4

Voor je begint...

Inleiding

Deze pop simuleert volwassene met een gemiddelde fysiologie en anatomie en werd ontworpen om een zo realistisch training van de basis levensreddende technieken aan te leren, voornamelijk CPR (cardiopulmonaire reanimatie).

Enkele kenmerken van de pop die als hulpmiddel hiervoor dienen zijn:

- natuurlijke obstructie van de luchtweg
- realistische gelaatstrekken en beweegbare onderkaak
- realistische reactie op beademing en compressie
- het rijzen van de borst bij beademing
- realistische kenmerken voor het lokaliseren van compressiepunten
- auditieve bevestiging van de correcte compressie diepte

Uitpakken en controleren

- Borst kind
- Tas
- Longzakje

Opgelet



- Reinig de pop vooraleer je ermee aan de slag gaat.
- Gebruik hiervoor het reinigingsdoekje of een mengsel van water en zeep.
- Gebruik geen schuurmiddelen!

Onderdelen

Longzakje
(inwendig – transparant
met klepkoppeling)



Gezichtshuid
(afneembaar)



Borsthuid
(afneembaar)


Compressieplaat
(inwendig - wit)



Sporttas
(grijs)




Verwijderen van het longzakje

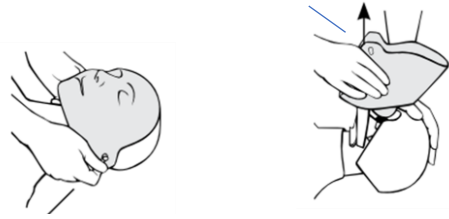


Verwijder de gezichtshuid

- Maak de gezichtshuid aan beide oren los.
- Hef ↑ de gezichtshuid van klepkoppeling

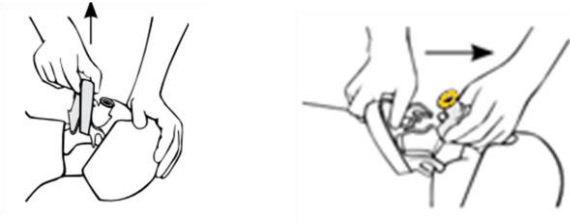


- Verwijder de onderkaak van de kleppen in het hoofd door er voorzichtig aan te trekken ↑
- Verwijder → de klep

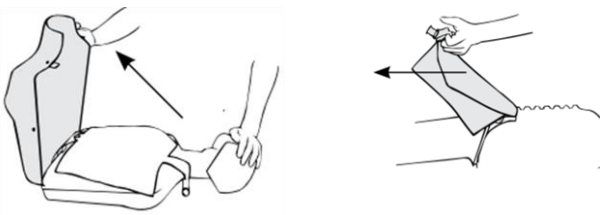

- Open ↖ de borsthuid voorzichtig van de torso.
- Verwijder ← de gebruikte luchtweg en werp het weg.

Plaatsen van het longzakje

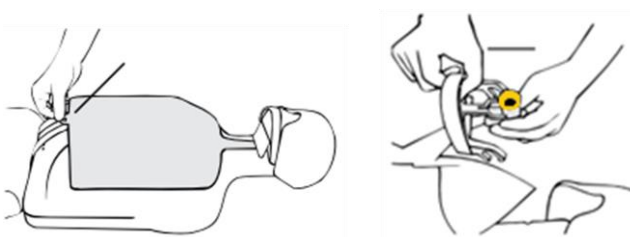


- Leg de long plat op de romp en maak vast aan de haak.
- Bevestig luchtwegklep aan het kaaksbeen.


Opgelet



Zorg dat het longzakje niet verdraaid is!

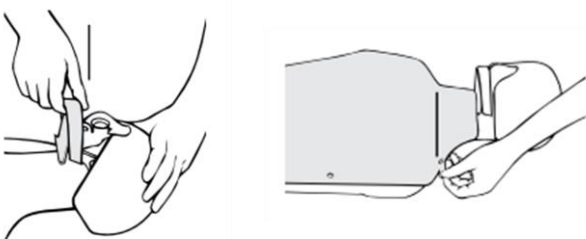

- Klik het kaaksbeen terug op de kleppen in het hoofd.
- Bevestig de ogen aan de borsthuid aan de vier houders

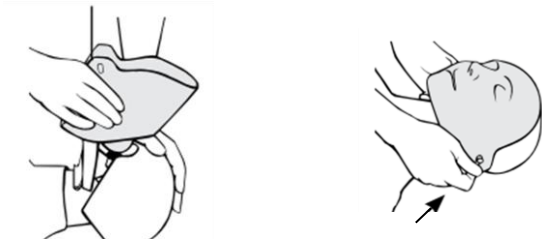

- Duw de gezichtshuidkoppeling (rood) in luchtwegklep van het longzakje.
- Maak de ogen aan de gezichtshuid vast aan de houders van het hoofd die zich aan beide oren ↗ bevinden.


De borst gebruiken...



Klikapparaat IN

Gebruik van het klikapparaat.

- Wanneer je de oefenpop uitpakt, bevindt het klikapparaat zich in de "on" stand (de hendel bevindt zich IN de pop)

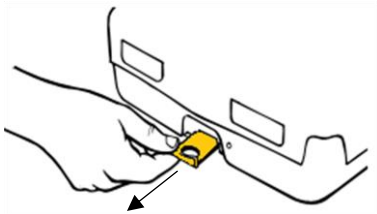

Klikapparaat UIT

Uitschakeling van het klikapparaat

- Trek de hendel van het klikapparaat naar buiten.

Na afloop van een oefensessie

Duw het klikapparaat altijd in de "on" stand voor u de oefenpop inpakt voor transport.
Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.