



Reanimatiepop

Groot lichaam

Resusci®Anne SkillReporter™

Quickstart Guide



Inhoud

Voor je begint.....	2
Inleiding.....	2
Uitpakken en controleren	2
Opgelet ⚠	2
Onderdelen.....	2
Werking luchtweg	3
Gesloten luchtweg.....	3
Vrije luchtweg	3
De reanimatiepop gebruiken	4
Opstellen reanimatiepop en SkillReporter.....	4
SkillReporter aan- en uitzetten	4
Indicatielampjes van de SkillReporter	5
Na afloop van een oefensessie	5

Voor je begint...

Inleiding

Elk Resusci Anne oefenpop stelt een volwassene voor met een gemiddelde fysiologie. De pop is ontworpen om de basistechnieken eerste hulp op een realistische manier aan te leren en te oefenen volgens internationale richtlijnen.

De Resusci Anne reanimatieoefenpop type SkillReporter heeft de volgende kenmerken:

- Natuurlijke obstructie van de luchtweg
- Beweegbare onderkaak
- Realistisch beademen en compressie
- De borstkas komt omhoog tijdens het beademen
- Realistische lokalisatie van compressiepunten Carotis polsslag, handmatig
- Gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van armen en benen (model met een volledig lichaam); -

Uitpakken en controleren

- Full Body-oefenpop met handbeschilderde gelaatsmasker op het hoofd
- 2 luchtwegen (1 reserve)
- Trainingsjas
- Trainingsbroek
- Resusci Manikin Wipes
- SkillReporter
- Quick Start
- Uitgebreide handleiding (voor NL: pag 62 – 72)

Opgelet



- Steek de stekker van de SkillReporter in het contact aan de rechterzijde van de pop als je wenst te oefenen met een aangesloten toestel
- Controleer eerst of de borstbevestiging op de juiste manier is vastgemaakt vooraleer de SkillReporter en/of oefenpop wordt gebruikt .

Onderdelen



Gezichtshuid



Kapsel



Nekhuid



Borsthuid

Lichaam



Training
(2-delig)

Gym schoenen
(1 paar - wit)



Koffer



Beademingsmasker



SkillReporter



Longzakje



Stoffen zakje (zwart)

Werking luchtweg



Hoofd in
'neutrale' positie



Hoofd in
'open' positie

Gesloten luchtweg

Wanneer het hoofd van de Resusci Anne zich in een 'neutrale' positie bevindt, is de luchtweg afgesloten.

Daardoor is de luchttoevoer naar de longen belemmerd.

Vrije luchtweg

De luchttoevoer wordt terug mogelijk gemaakt doordat er een vrije doorgang is::

- Wanneer het hoofd voldoende naar achteren wordt getild,
- **en/of** de kin moet opgetild en/of ondersteund worden.
- Of door de onderkaak naar voor te bewegen.

Inademing

- De ingeblazen lucht gaat naar de long (a) via de gelaatskoppeling (b), de luchtwegkoppeling met eenrichtingsklep (c), de inademingslang (d), de eenrichtingsklep (e) en de longslang (f).
- Bij beademing openen de klepmembranen (g en h) zich door de beademingsdruk, zodat luchttoegang mogelijk is.
- Zodra de beademing stopt, sluit het membraan (g), zodat de ingeblazen lucht niet kan terugkeren naar de mond en de neus.



Uitademing

Lucht ontsnapt uit de long t.g.v. het gewicht en de elasticiteit van de borstwand.

- Het membraan (h) sluit in de eenrichtingsklep de doorgang naar de inspiratieslang af en opent de doorgang naar de expiratieslang (i), zodat uitgeademde lucht door de opening (j) aan de zijkant van de pop ontsnapt.

Hartslag

- Een voelbare hartslag in de carotislagaders aan beide zijden van de adamsappel wordt gesimuleerd door ritmisch in de ballon te knijpen. De voelbare hartslag in de carotislagaders is ook aanwezig als er een hartmassage wordt toegepast

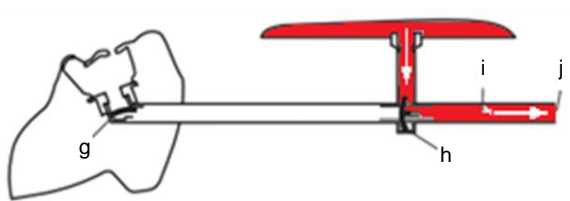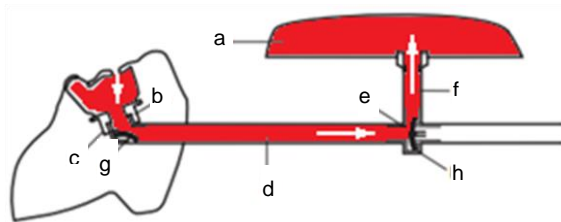

De reanimatiepop gebruiken...

Opstellen reanimatiepop en SkillReporter

Steek de stekker van de SkillReporter in het contact aan de rechterzijde van de pop als je wenst te oefenen met een aangesloten toestel.

Zorg ervoor dat de borstbevestiging op de juiste manier is vastgemaakt vooraleer de SkillReporter en/of reanimatieoefenpop wordt aangezet.

SkillReporter aan- en uitzetten

A → AAN/UIT-knop

- Druk op de knop van de SkillReporter of druk aan de rechterzijde van de oefenpop de knop in
- Door dezelfde knop opnieuw in te drukken schakelt de SkillReporter uit.

B → metronoom

- geeft het tempo aan van 80 of 100 slagen/min.
- geeft feedback aan de instructeur en de cursist.

C → automatisch uitschakelen

- De SkillReporter en de oefenpop schakelen zichzelf automatisch uit na:
- 10 min als geen registratie meer gebeurde
 - 60 min als de logfunctie C geactiveerd is.



D → SHORT print, kort rapport afdrukken

- de data van de reanimatie-oefening moet geregistreerd zijn
- indrukken 'SHORT print' **TIJDENS** het registreren van een scenario: een kort statistisch verslag wordt afgedrukt zolang de knop ingedrukt blijft
- indrukken 'SHORT print' **NA** het registreren van een scenario: een kort statistisch verslag van de gehele oefening zal gedrukt worden


E → LONG print, lang rapport afdrukken

- Uitgebreid verslag kan tijdens of na de oefening starten, voor zover de "LOG"-knop aan stond.



Noot: de handelingen van een reanimatieoefening kunnen ook met de LOG -functie geregistreerd worden zonder dat de SkillReporter is aangesloten.

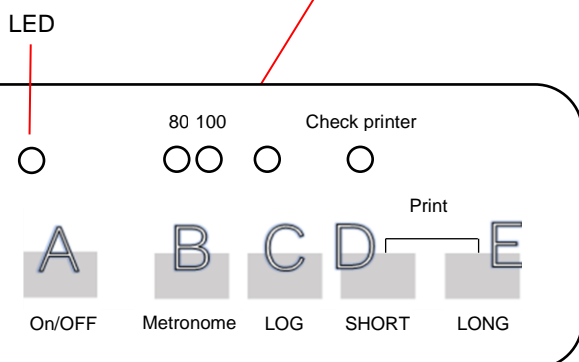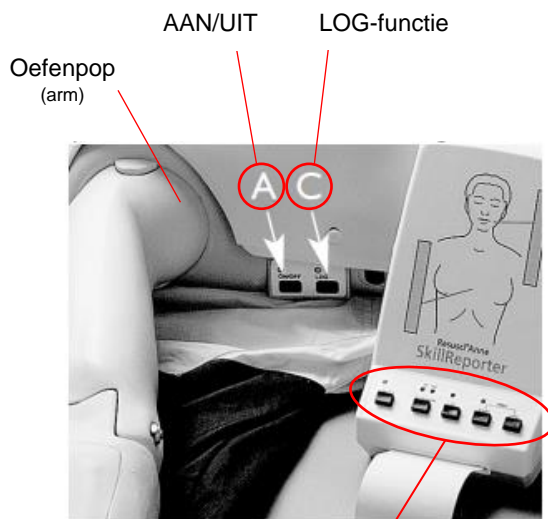

	Licht	Indicatie	Limieten*
Inflatievolume	geel ●	onvoldoende	< 0,5 l
	groen ●	voldoende	0.5 l – 0.8 l
	oranje ●	te veel	> 0.8 l
Compressiediepte	geel ●	onvoldoende	< 38 mm
	groen ●	voldoende	38 – 51 mm
	rood ●	te veel	>51 mm
Te snelle inflatie	rood ●	correcte	< 1 sec

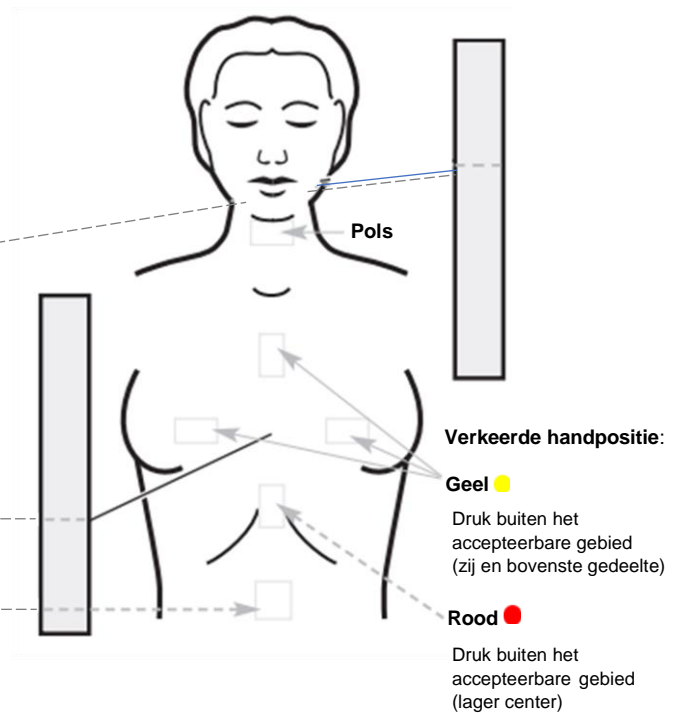

Indicatielampjes van de SkillReporter

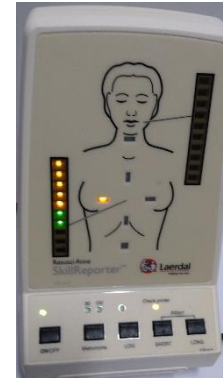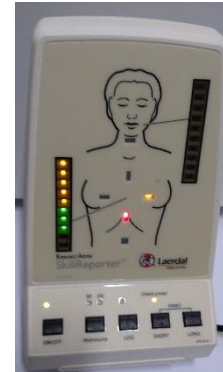

Na afloop van een oefensessie

Controleer de oefenpop en de SkillReporter en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.